


Sistema Paraguide para Pilares Paralelos

EL SISTEMA PARAGUIDE AYUDA A LOGRAR PARALELISMO Y RESULTADOS ESTÉTICOS, Y FUNCIONA DE MANERA FÁCIL Y RÁPIDA.

USO DEL SISTEMA: aún en implantes forzados o cuando no se busca una conexión paralela, las súper estructuras que se insertarán luego necesitan una línea común de inserción de la prótesis. El sistema Paraguide permite al profesional colocar implantes hexagonales de manera óptima desde la cirugía.

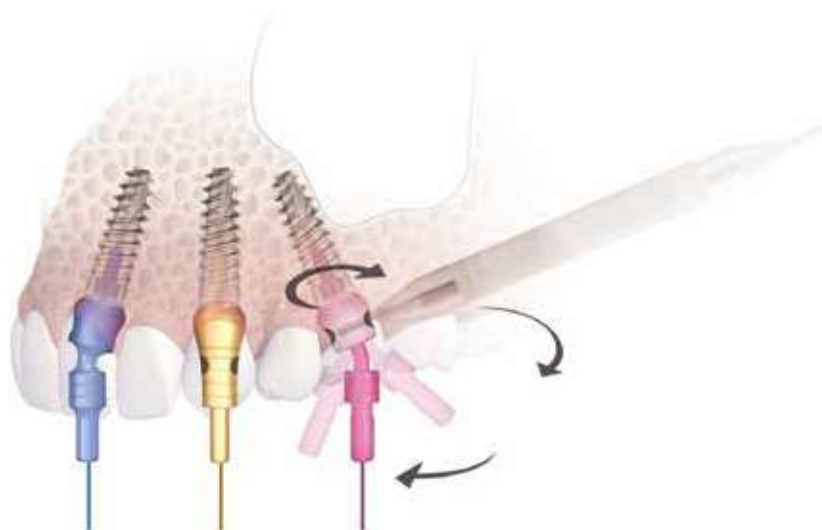

Paraguide de hexágono interno (titanio)

Los artículos se venden por separado o en juegos de 3 piezas. Nro. de Ref. del juego 5230

Herramienta de rotación (acero inoxidable)



Código	TPG 0	TPG 15	TPG 25	RT
Nro. de Ref.	5230-0	5230-15	5230-25	4290
Instrucciones	<p>Inserte dentro del implante la guía específica Paraguide (0°, 15°, 25°). Rote el implante dentro del hueso con ayuda de la herramienta de rotación (RT) en sentido horario hasta que el pilar Paraguide quede paralelo a los otros pilares.</p> <p>Antes de rotar el implante, intente insertar el Paraguide en las diferentes posiciones del hexágono interno.</p> <p>Para lograr el pilar con el mismo ángulo en la rehabilitación, registre el ángulo del pilar Paraguide utilizado para cada implante. En el caso de un pilar único inserte el Paraguide y gírelo hacia el ángulo que lo orienta hacia la mejor línea de inserción de la futura prótesis.</p>			